

Roger MyLink

Quick setup guide / Schnellstartanleitung

Guide d'installation rapide / Stručný návod na použití




roger



PHONAK
life is on

Components
Komponenten
Composants
Komponenty

Roger MyLink

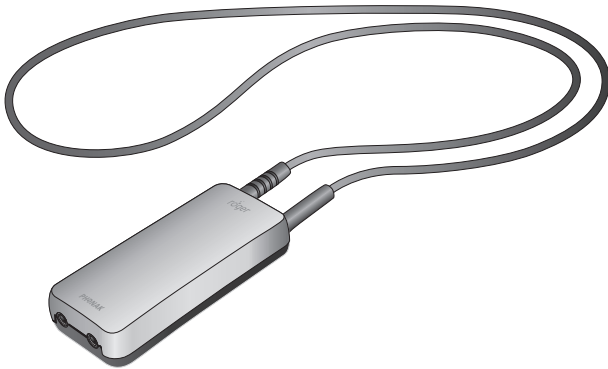


Napájanie





1

Charging Roger MyLink
Roger MyLink aufladen
Charger Roger MyLink
Nabíjanie zariadenia Roger MyLink

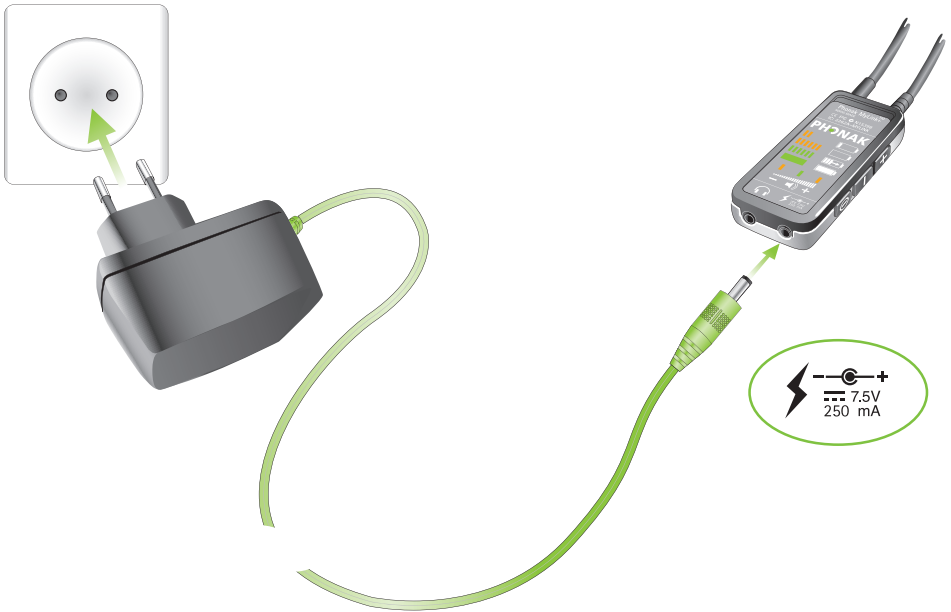


Wearing Roger MyLink
Roger MyLink tragen
Porter Roger MyLink
Noszenie zariadenia Roger MyLink

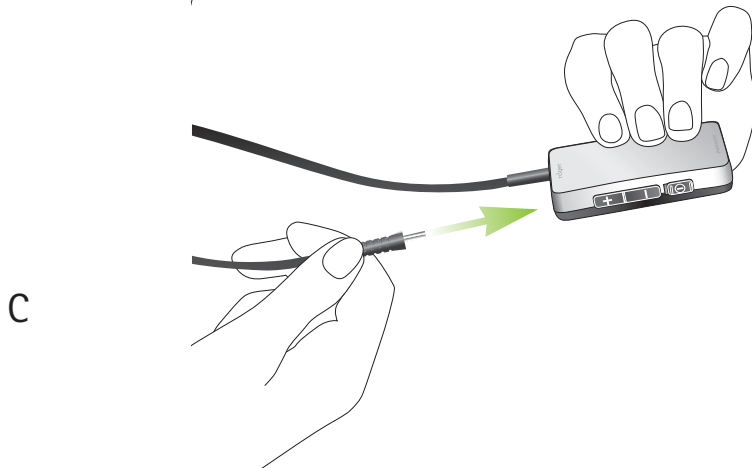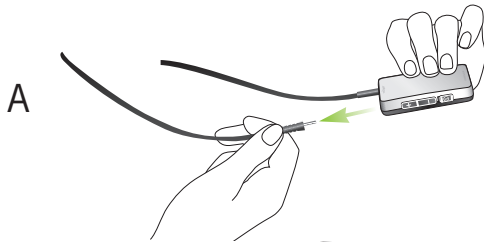

Switching on Roger MyLink and its Roger microphone
Roger MyLink und Roger-Mikrofon einschalten
Mise en marche du Roger MyLink et du Roger microphone
Zapnutie zariadenia Roger MyLink a jeho mikrofónu Roger

A

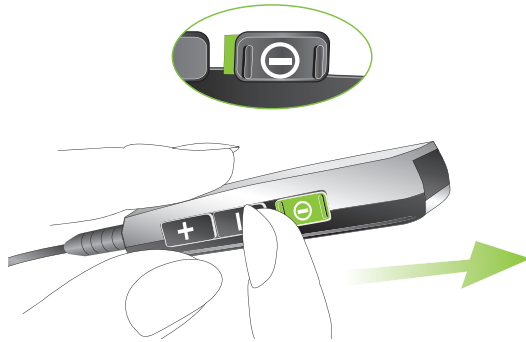


B





Activate the T-Coil program in your hearing aid
Telefonspule im Hörgerät aktivieren
Activer le programme T-Coil de votre aide auditive
Aktivujte program na T-cievce v načúvacom prístroji



T/MT

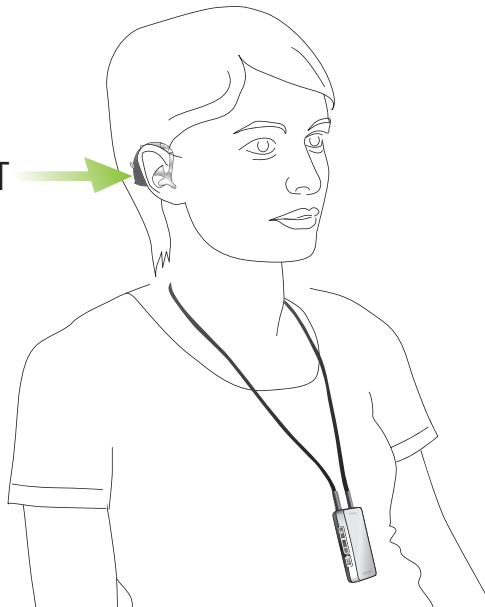


Adjust the volume
Lautstärke einstellen
Réglage du volume
Nastavte hlasitost'

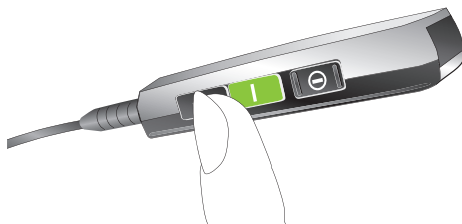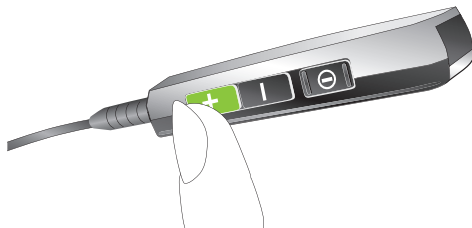




Connect Roger MyLink to your Roger microphone
Verbinden Sie Roger MyLink mit Ihrem Roger Mikrofon
Connecter Roger MyLink avec votre Roger microphone
Pripojte zariadenie Roger MyLink k svojmu mikrofónu

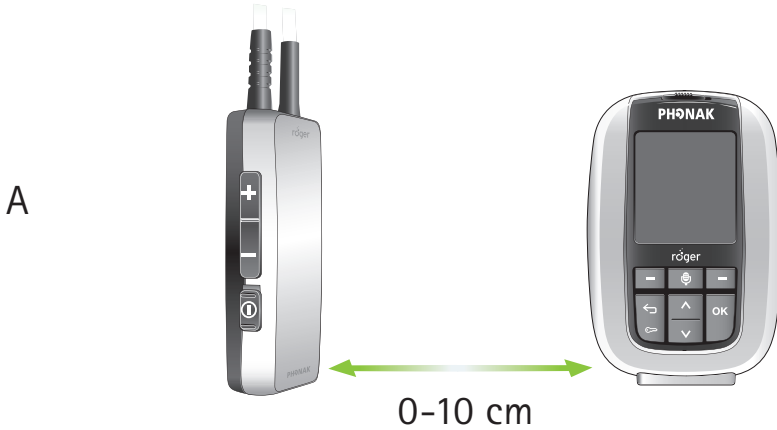

Roger MyLink is not compatible with FM transmitters
Roger MyLink Funktioniert nicht mit FM Sender
Roger MyLink n'est pas compatible avec des émetteurs FM
Roger MyLink nie je kompatibilný s FM prijímačmi



End

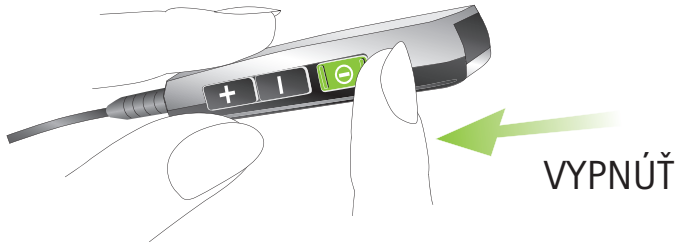

The Roger MyLink user guide will give you detailed information about the setup.

Die Roger MyLink Gebrauchsanweisung informiert detailliert über den Gebrauch.

Le mode d'emploi Roger MyLink vous donnera des informations détaillées sur l'utilisation.

Podrobné informácie k používaniu zariadenia Roger MyLink nájdete v príslušnej užívateľskej príručke.

Servis a záruka

Na výrobok je poskytovaná záručná doba v súlade s platným občianskym zákonníkom SR, ktorá vstupuje v platnosť v deň nákupu.

Táto záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo starostlivosťou, vystavením chemikáliám, ponorením do vody alebo nadmerným namáhaním. Poškodenie spôsobené okolnosťami ako napr. pádom na zem, vypraním, rozšliapnutím, rozhryznutím od zvieraťa, vysúšaním v mikrovlnnej rúre a pod. nie je predmetom poskytnutej záruky. Záruka stráca platnosť pri škodách spôsobených tretími stranami alebo neautorizovaným servisom. Táto záruka sa nevzťahuje na servisné zásahy prevedené predajcom na jeho prevádzke.

Záručný list musí byť riadne a čitateľne vyplnený vrátane dátumu zakúpenia, podpisu a pečiatky predajcu.

Táto záruka sa vzťahuje na zariadenie značky Phonak, ktoré je uvedené nižšie.

Sériové číslo zariadenia: _____

Dátum zakúpenia: _____

Podpis a pečiatka predajcu: _____

Distribútor

Artsonic s. r. o.

Sídlo:

Radlinského 27

811 07 Bratislava

IČO: 52 800 008, IČ DPH: SK2121165783

zapísaná v obchodnom registri vedeného u Okresného súdu v Bratislave 1, oddiel: SRO, vložka č. 142695/B

Centrálny servis:

Akustik plus s. r. o.

Krížna 5

811 07 Bratislava

tel.: SK 02 554 24 272

e-mail: akustik@akustik.sk, servis.phonak@akustik.sk

Facebook: [@PhonakSlovensko](#)

You Tube: Phonak CZ/SK

Kontaktné a servisné formuláre: www.akustik.sk

Doplnky pre načúvacie prístroje:

batérie, čistiace prostriedky, diaľkové ovládanie, príslušenstvo pre počúvanie televízie, telefonovanie, bezdrôtová komunikácia a iné www.audiodom.sk

© Kopírovanie časti a/alebo celej tejto príručky je možné len so súhlasom spoločnosti Artsonic s. r. o.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Sonova Communications AG týmto vyhlasuje, že tento výrobok je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ o rádiových zariadeniach. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je možné získať od výrobcu alebo miestneho zástupcu značky Phonak, ktorého adresa je uvedená na internetových stránkach www.phonak.com.

Autorizovaný predajca:



Distibútor pre Slovenskú republiku:

Artsonic s. r. o.

so sídlom Radlinského 27

811 07 Bratislava

www.artsonic.sk

www.phonak.sk



Výrobca:

Sonova Communications AG

Herrenschwandweg 4

CH-3280 Murten

Švajčiarsko

www.phonak.com/phonak-roger

029-3165-Slovak/V2.00/2021-07/A+W/SB © Sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

